



BUSCANDO TU
POSTURA ADECUADA

Guía para medir y elegir la
talla correcta de tu soporte
postural Neoflex



Neo 00 Universal

- Neo 00.01** Banda multiusos
- Neo 00.02** Extensión de banda multiusos

Neo 20

- Neo 20.01** Chaleco ancho
- Neo 20.02** Chaleco ancho con cremallera
- Neo 20.03** Chaleco estrecho
- Neo 20.04** Chaleco estrecho con cremallera
- Neo 20.05** Arnés de hombros
- Neo 20.06** Arnés de hombros tipo "H"
- Neo 20.07** Cincha pectoral

Neo 30

- Neo 30.01** Cinturón pélvico de 2 puntos
- Neo 30.02** Cinturón pélvico de 4 puntos
- Neo 30.03** Control de abducción

Neo 40

- Neo 40.01** Banda de pantorrillas
- Neo 40.02** Control del tobillo

Neo 20

Neo 30

Neo 40



¿CÓMO MEDIMOS?

Neo 00.01 Banda multiusos

Neo 00.02 Extensión de banda multiusos

Mide la **circunferencia total del pecho + respaldo**, agrega un extra de 15-20 cm, y traslada esta dimensión a la tabla para encontrar la talla correcta.



A	Talla
<80 cm	S
80-120 cm	M
121-140 cm	L
141-160 cm	XL

¿CÓMO MEDIMOS?

Neo 20.01 Chaleco ancho

Neo 20.02 Chaleco ancho con cremallera

Neo 20.03 Chaleco estrecho

Neo 20.04 Chaleco estrecho con cremallera



Mide el ancho del pecho bajo los brazos y traslada esta dimensión en la tabla para encontrar la talla correcta.



B	Talla
>24 cm	XS
25-26 cm	S
27-32 cm	M
33-39 cm	L
40-46 cm	XL


¿CÓMO MEDIMOS?

Neo 20.05 Arnés de hombro

Neo 20.06 Arnés de hombro tipo "H"



Mide la longitud total desde la parte superior del hombro hasta la base del codo y traslada esta dimensión en la tabla para encontrar la talla correcta.

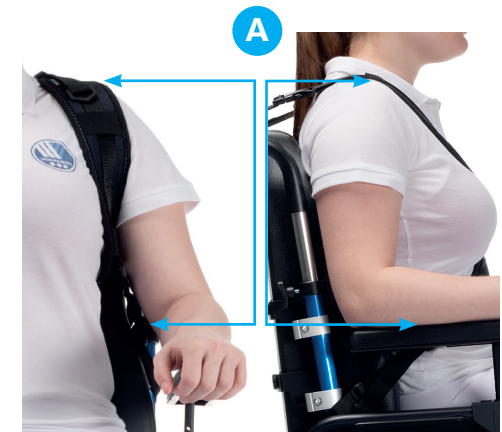

A	Talla
25-30 cm	S
31-37 cm	M
38-40 cm	L
41-45 cm	XL

¿CÓMO MEDIMOS?

Neo 30.01 Cinturón pélvico de 2 puntos

Neo 30.02 Cinturón pélvico de 4 puntos



Mide el ancho de la pelvis y traslada esta dimensión en la tabla para encontrar la talla correcta.



A	Talla
25-33 cm	XS
31-40 cm	S
39-52 cm	M
48-65 cm	L

¿CÓMO MEDIMOS?

Neo 30.03 Control de abducción

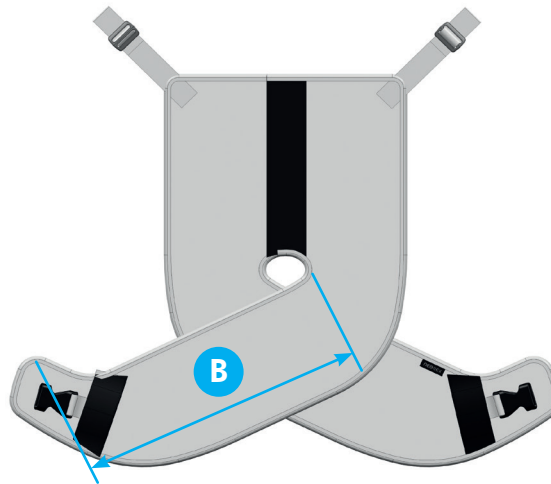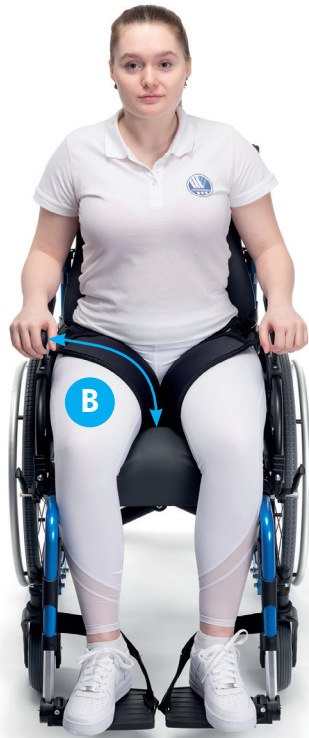

Mide la distancia desde la superficie del asiento hasta la parte exterior del muslo como se muestra en la imagen, y traslada esta dimensión a la tabla para encontrar la talla correcta.

B	Talla
17-24 cm	XS
24-26 cm	S
27-32 cm	M
33-38 cm	L

¿CÓMO MEDIMOS?

Neo 40.01 Banda de pantorrillas

Mide la distancia entre los tubos principales del reposapiés y traslada esta dimensión a la tabla para encontrar la talla correcta.



A	Talla
18-24 cm	S
25-32 cm	M
33-40 cm	L
40-50 cm	XL

¿CÓMO MEDIMOS?

Neo 40.02 Control de tobillo para ambos pies

Mide el perímetro del tobillo y traslada esta dimensión a la tabla para encontrar la talla correcta.



	Talla
14-17	XS
17-20	S
19-23	M
22-29	L
28-33	XL

